




ePttAVM.com tarafından ücretsiz gönderilen Maske Nasıl Kullanılır?



1
MASKENİZİ TAKMADAN ÖNCE
ELLERİNİZİ DEZENFEKTAN
YA DA SABUN VE SU İLE
İYİCE TEMİZLEYİNİZ.

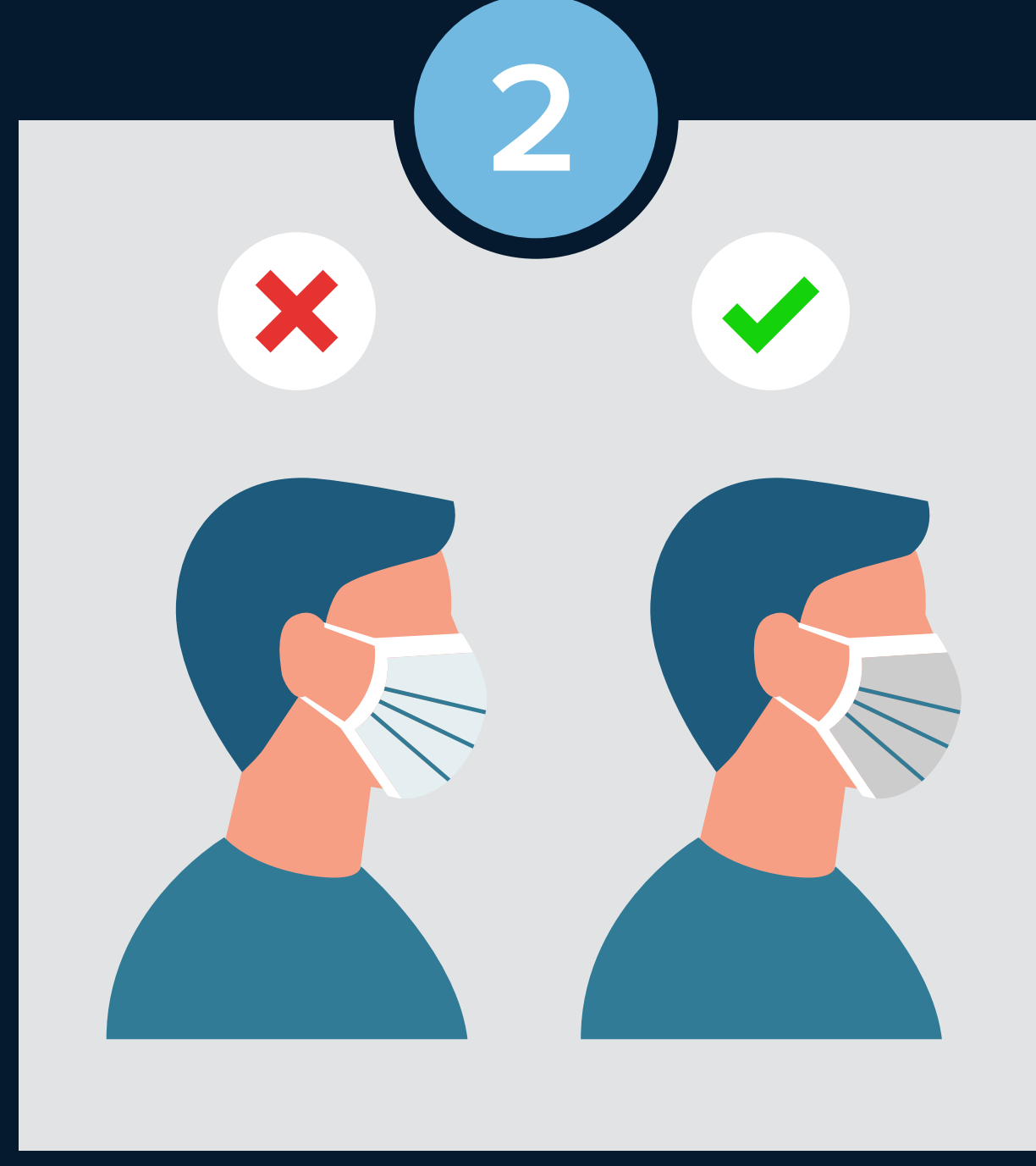

2
İÇ VE DIŞ KISMININ
DOĞRU TARAFININ YÜZÜNÜZE
DENK GELDİĞİNDEN
EMİN OLUN.



3
KENAR KISMINDA BULUNAN
METAL ŞERİDİ BURNUNUZUN
ÜST KISMINA GELECEK
ŞEKİLDE YERLEŞTİRİN.



4
HER İKİ YANINDA BULUNAN
LASTİKLERİ KULAKLARINIZIN
ARKASINDAN GEÇİRİN.



5
AĞZINIZ VE BURNUNUZUN
İYİCE KAPANDIĞINDAN
EMİN OLUN.



6
BURNUNUZUN ÜSTÜNDE
KALAN METAL / PLASTİK KISMI
PARMAKLARINIZ YARDIMI İLE
SIKIŞTIRIN.




İLK 6 AŞAMAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ TAKDİRDE
MASKENİZİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE TAKMIŞ OLACAKSINIZ.



MASKENİZE DOKUNMAYIN.
EĞER DOKUNDUYSANIZ
ELLERİNİZİ YIKAYIN
YA DA DEZENFEKTE EDİN.



MASKENİZ NEMLENİRSE YA DA
ISLANIRSA KULLANMAYA
DEVAM ETMEYİN VE YENİSİ İLE
DEĞİŞTİRİN.

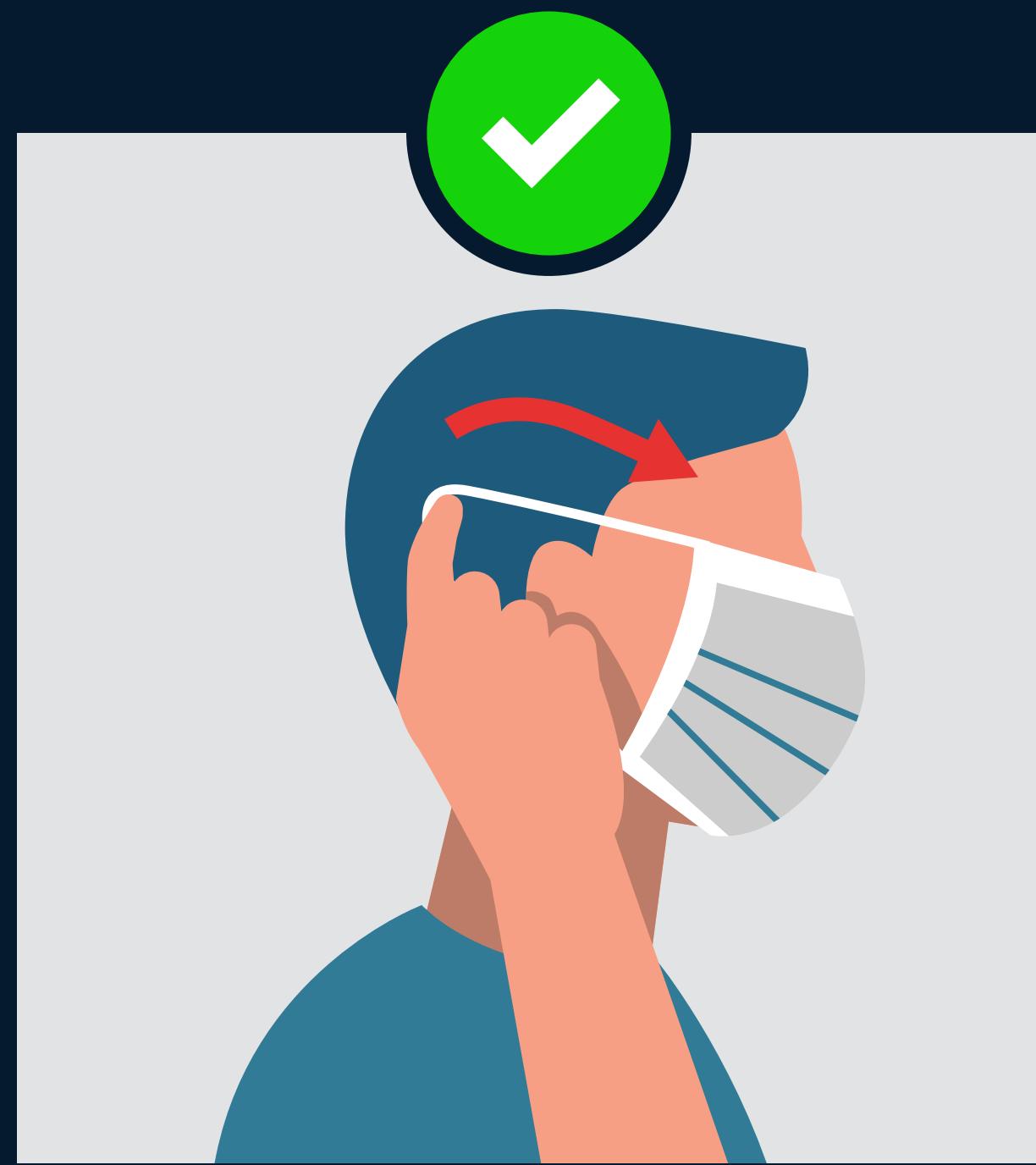

MASKENİZİ LASTİKLERİNDEN
PARMAKLARINIZ YARDIMI İLE
TUTARAK ÇIKARTIN.



ÇIKARTTIĞINIZ MASKENİN
ÖN KISMINA DOKUNMADAN
KAPAKLI BİR ÇÖP KUTUSUNA
ATIN VE KAPAĞI KAPATIN.

Ücretsiz maskenizi talep etmek için maske.epttavm.com adresini ziyaret edin.

